

# ベビーズマットレス ベビーズシーツ

新生児の肌をやさしく守る、  
クリーンなウレタンフォームと  
ソフトタッチシーツ。



小さなからだに、  
希望いっぱい  
のやさしさ。



# ベビーズマットレス ベビーズシーツ



- ソフトで、復元性にも優れたベビーズマットレスは、高い体圧分散効果をもたらします。
  - マットレスには、残留物の少ない、クリーンなウレタンフォームを使用しています。
  - ベビーズシーツは、ソフトで伸縮性に優れ、ウレタンフォームマットレスの形状によくフィットします。撥水効果も高いので、ウレタンフォームへの湿気の浸潤を防ぎます。
- ベビーズマットレスは、下記条件で最長2週間の使用を限度とした、ディスプレイザブル（使い捨て）製品です。マットレスの状況を観察しながら、適宜交換してください。
- ※試験条件:株式会社高研製 コーケンベビー (2820g) をモデルとし、クベース内環境条件を室温35.0℃湿度90%に設定して、2週間静置した状態で、異常が無いことを確認。
- ベビーズマットレスには、ベビーズシーツを組み合わせてお使いください。専用シーツと組み合わせることで、性能をいかにすることができます。また、マットレスには直接児を寝かせないでください。
- ベビーズシーツには撥水性がありますが、汚れた場合や摩擦による傷み、表面の毛玉などが目立ち始めたら、適宜交換して下さい。
- ベビーズマットレスは、日本小児ストーマ・排泄管理研究会 装具等検討委員会 (2006-2009年度) で開発された、主に低出生体重児を対象とした、新生児用体圧分散オーバーレイ (上敷き) マットレスです。

## ○仕様

### ベビーズマットレス (未滅菌)

商品コード	商品記号	サイズ (mm)	ケース入数	
7241900	BB-MTLS	350×730×40	10 枚	
NEW 7494100	BB-MTLS2	500×700×40	10 枚	オープンクベースサイズ

### ベビーズシーツ (滅菌済)

商品コード	商品記号	サイズ (mm)	ケース入数	
7242000	BB-SHT	540×960	40 枚	
NEW 7494000	BB-SHT2	750×1000	40 枚	オープンクベースサイズ



日本メディカルプロダクツ株式会社

本社/〒078-8232 北海道旭川市豊岡2条4丁目4番14号  
TEL.0166-32-5320 FAX.0166-33-8749

旭川支店/ 〒078-8232 旭川市豊岡2条4丁目4番14号  
TEL.0166-32-5307 FAX.0166-33-8749

大阪支店/ 〒550-0005 大阪市西区西本町2丁目5番28号 コスモ西本町ビル5F  
TEL.06-6543-5680 FAX.06-6543-5681

札幌支店/ 〒001-0032 札幌市北区北32条西12丁目1番10号  
TEL.011-728-0331 FAX.011-747-6159

広島支店/ 〒733-0037 広島市西区西観音町9番7号 なかよしビル4F  
TEL.082-297-7801 FAX.082-232-2905

仙台支店/ 〒981-3133 仙台市泉区泉中央1丁目22番地2 高保寺番館1F  
TEL.022-772-7017 FAX.022-772-7027

福岡支店/ 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南4丁目2番10号 南近代ビル8F  
TEL.092-477-6505 FAX.092-477-6563

東京支店/ 〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町12番9号 滋賀ビル8F  
TEL.03-3663-6110 FAX.03-3663-6033

青森営業所/ 〒030-0846 青森市青葉3丁目9番8号 三成ビル2F  
TEL.017-729-8505 FAX.017-729-8543

名古屋支店/ 〒464-0075 名古屋市中種区内山3丁目10番17号 今池セントラルビル7F  
TEL.052-732-0673 FAX.052-732-0683