

大きなクッションで、自在にポジショニング。

プリコンクッション

クッションの下に小枕を入れることで、体位変換の間接法にも使えます。



洗えます



特定用途
制菌加工



特殊な中材が、自在に動いて形状を保持。
全く新しい使い心地です。

カットされたウレタンフォームと
発泡ビーズを混ぜ合わせた中材を「ゆるめ」に詰めました。

●ウレタンなどの、形の有るクッションでは、合う人と合わない人が…

●ビーズクッションなどでは、形が保持できない…

そのような時、「プリコンクッション」がお役に立ちます。

ウレタンフォームの間にビーズが「潤滑油」のように働き、クッションは自在に変形します。クッションに荷重をかけると、ウレタン同士が接触して形を保持。しっかりとした「その人に合わせた形のクッション」になります。

本体価格 **20,500円** (税込価格22,550円)

品番	CPC-8101	J A N	4580573240011
重量	(約) 1.4 kg	サイズ (約)	幅 80 × 奥行 80 × 厚さ 16 cm
材質	中 材：ウレタンフォーム、発泡ポリプロピレンビーズ 外カバー：ポリエステル100%、特定用途制菌・吸水・速乾・帯電防止加工 内カバー：ポリエステル100% ※中材も、内カバーごと丸洗いができます。		

やさしい
構造

自在に変形して、その形を保つのでこんなに便利

クッションの中材を寄せたり
広げたりすることで、様々な
形になります。中材をほぐすと、
容易に形は崩れます。

下肢のポジショニング以外でも、
背上げ時の補助としても便利。
特に円背の方の上体の安定に
有用です。



感染対策も万全 **滅菌洗濯及び乾燥機での乾燥が可能**

特殊発泡ビーズを採用することで「80℃熱水での滅菌洗濯」と「乾燥機による機械乾燥」が可能。衛生的にお使いいただけます。

※高温環境下では、ウレタンやビーズ等の高分子素材の劣化は促進されます。
衛生管理上必要なとき以外は、常温洗濯及び低温乾燥をお勧めします。

洗濯 時のために
合わせてどうぞ！

**交換用専用
外カバー**

本体価格 **4,000円** (税込価格4,400円)

品番 PCC-8101

J A N 4580573240035


CHECK! 有用性のエビデンス
体圧を効果的に分散!!

臀部周辺の体圧減少の効果が確認されました。

拘縮の強い人は、膝周辺がマットレス面に接触しないので、
下肢の重量は臀部と足先にかかります。
プリコンクッションは下肢全体を支えるので、その重量を分散。
仙骨部周辺や踵部の体圧を減少します。

(医療法人社団浅ノ川 千木病院 共同研究
2007年9月 第15回日本療養病床協会全国研究会神戸大会 および
9月 第4回日本褥瘡学会中部地方会学術集会にて発表)

臀部から足先周辺の体圧分散の変化 変形を伴う、寝たきり高齢者での計測例

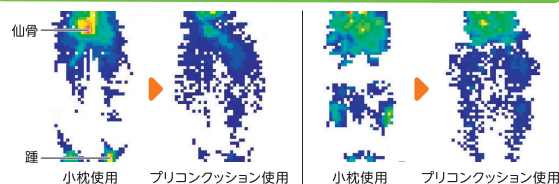

他にも、さまざまなメリットが…

・足先を浮かせることで、踵部や外踝・内踝の除圧も図れます。
・小枕をたくさん使うのに比べ、介護者によるポジショニングの「差」が少なくなります。
・積み重ねた小枕の「崩れ」による、ポジショニングの崩れが防げます。

共同開発：医療法人社団浅ノ川 千木病院 (石川県金沢市)

開発・発売元



ケアプロダクツ

HOME PAGE www.care-products.jp

〒254-0813 神奈川県平塚市袖ヶ浜17-40-307
【TEL】0463-26-6201 【FAX】0463-26-6202
【E-Mail】info@care-products.jp



●製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。 ●製品写真は印刷の関係上、実際の色とは異なることがあります。 ●価格はメーカー希望小売価格で参考価格です。 ●製品の価格以外に、別途、梱包送料が必要となる場合があります。 ●製品、サービスに関するお問い合わせは、お求めの販売店か、弊社までご連絡ください。

MADE IN JAPAN