




アルサフリー[®] ※1 リバーシブルPROマットレス

GALAX[®] MC 抗菌・難燃・防虫 GALAX採用 SEKI 特定用途 抗菌加工

標準マットレスとしてもお使いいただける、体圧分散マットレスです。 ※1)アルサフリーは株式会社イノアックコーポレーション・株式会社イノアック技術研究所の登録商標です。

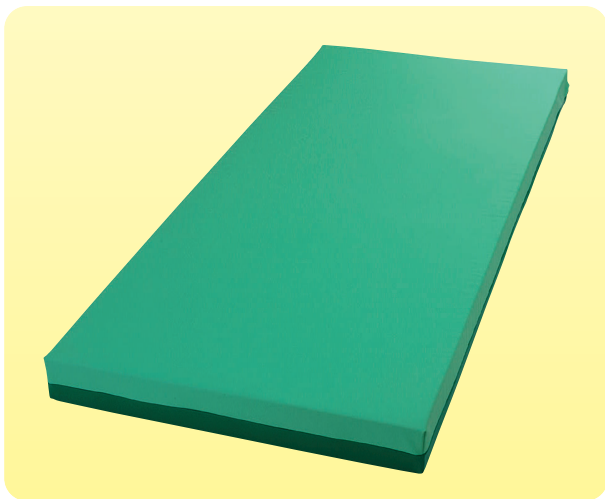

適度な硬さのマットレスを裏返すだけで、
体圧分散マットレスに。
本邦で唯一※2の
「体圧分散リバーシブルマットレス」です。

- ・2種類のマットレスが一体化。適度な硬さのマットレスを裏返すだけで、体圧分散マットレスになります。幅広い身体の方にお使いいただけます。
- ・ご自分で動かれる方や、腰痛の予防には標準面を。硬さではなく反発力を高めた設計が、適切な寝姿勢を保ちます。
- ・低反発ウレタンフォームを贅沢に使用した柔面は、体圧分散性に優れ、床ずれ対策にお使いいただけます。
- ・カバーは、高伸縮と高強度を両立した“Galax[®] MC”を使用。止水ファスナーの効果も相まって、感染制御にも対応します。

※2)2010年7月現在、当社調べ。
日本褥瘡学会が定義する「圧分散面の厚さが7cm」のリバーシブルマットレス

価格 **80,000円 + 消費税**

■材 質/ウレタンフォーム(2層) ■カラー/ライトグリーン・ダークグリーン
■カバー/ポリエステル100%、ウレタンラミネートによる防水・特定用途抗菌・難燃加工(Galax[®] MC)

タイプ	品番	JANコード	TAISコード	サイズ	重量
910幅	URP-101	JAN 4905564060810	TAIS 00357-000020	(約) 幅 91 × 長さ191 × 厚さ12cm	(約) 13 kg
830幅	URP-103	JAN 4905564060087	TAIS 00357-000007	(約) 幅 83 × 長さ191 × 厚さ12cm	(約) 12 kg

やさしい
構造

幅広い身体状況の方に対応できます。

体圧分散も配慮した、二重構造。長く使えるリバーシブル仕様。



緑の薄い面 **柔らかめ** 体圧分散マットレス

ソフトに体を包んで支える、超高密度低反発ウレタンフォームは、体の沈みすぎを防ぎながら長期間にわたって安定して体圧を分散します。

緑の濃い面 **適度な硬さ** 標準マットレス

しっかりした腰のある高反発ウレタンフォームは、硬すぎないので、痩せた方の体もやさしくサポートします。

お身体の状況により、使用面を選べます。

これらを最適なバランスで積層していますので、両面の特性の違いがはっきり体感できることも、大きな特徴です。



選択のめやす

一般的なリバーシブルタイプのマットレスと異なり、より高い体圧分散効果を有しています。

	床ずれ発生リスク			
	無し	軽度	中等度	高度
一般マットレス	●			
一般的なリバーシブルタイプマットレス		●		
アルサフリー [®] リバーシブルPROマットレス			●	
高機能エアマット				●

幅広く対応
できます。

詳細は裏面をご覧ください。

開発・発売元




ケアプロダクツ

HOME PAGE www.care-products.jp

〒254-0813 神奈川県平塚市袖ヶ浜17-40-307
【TEL】0463-26-6201 【FAX】0463-26-6202
【E-Mail】info@care-products.jp

- 製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。
- 商品写真は印刷の関係上、実際の色とは異なる場合があります。
- 価格はメーカー希望小売価格で参考価格です。
- 商品の価格以外に、別途、梱包送料が必要となる場合があります。
- 商品、サービスに関するお問い合わせは、お求めの販売店か、弊社までご連絡ください。

本邦で唯一の、褥瘡予防リバーシブルマットレス

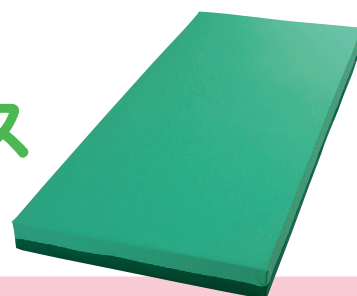


共同開発 金沢大学 医学部保健学科(現 東京大学大学院 医学系研究科) 真田弘美教授
金沢大学 医学部保健学科(現 金沢大学 医薬保健研究域保健学系) 須釜淳子教授

やさしさの特徴

1 日本で唯一の体圧分散リバーシブルマットレス。

表裏で硬さの異なる、体圧分散(床ずれ防止)マットレスです。

- ・RCTにより有用性が確認され、日本で唯一、日本褥瘡学会で認められている「体圧分散用具としてのリバーシブルマットレス」です。
- ・他社のリバーシブル製品は「硬めと標準の表裏」ですが、当社は「標準と柔らかめの表裏」で、狙いとす位置付けが異なります。
- ・国内ウレタンフォームメーカーだから成し得た、耐久性の高い高密度ウレタンフォームを使用しています。

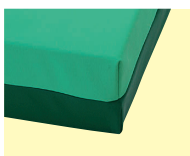

2 必要なモノで、無いモノは作り出す。

ケアマットレス専用開発した、高伸縮で高強度な防水カバーを使用しています。

- ・滑らせてごまかしません。中芯のソフトさを活かします。
- ・特定用途抗菌加工(MRSA対応)と、難燃加工も施されています。(防水膜面・ベース生地両方)
- ・水の入りにくい「止水ファスナー」も、業界で初めて採用しました。



高伸縮
防水カバー



止水ファスナー

3 日本人のために日本人が作りました。

日本製の、日本人に向けた設定です。

- ・平均体重が異なる、欧米人向けに設定された輸入品とは異なります。
- ・国産ゆえの小回り。小児ベッド用などの特殊サイズにも対応できます。

4 長く安心して使っていただきたい。

体圧分散マットレスとしての耐用限界を超えても、さらに数年は使えます。

- ・使い方にもよりますが、4~6年で体圧分散寝具としては寿命を迎えます。しかし、裏返すことで、標準マットレスとしてさらにあと数年は使うことができます。
- ・カバーを切ってしまうと、交換が可能です。不確実な補修で、汚染物が中に浸み込む危険性はありませんので、安心です。

替えカバー RPC-101(URP-101用)・RPC-103(URP-103用)
価格 24,000円 + 消費税

5 より多くの方にお届けしたい。

国内のウレタンフォームメーカー直売ゆえの経済性です。

- ・どんなに安い標準マットとエアマットを組み合わせるよりも、低価格です。
- ・ベッド上で裏返すだけで、硬さ(機能)が変えられますので、エアマットを探し回ったり、マットレスを入れ替える手間がありません。
看護ケアの省力化にも貢献します。
- ・清拭による感染制御対応ですので、洗濯や滅菌にかかる費用は原則必要ありません。

マットレスの限界

本マットレスは、より幅広い身体状況の方に適合するように設計されていますが、以下の方には向かないこともございます。

高度な褥瘡を保有しておられる方

原疾患や栄養状態など、全身状態により異なりますが、大まかな適用としては、NPUAP分類でステージⅡ、もしくはステージⅢ一ヶ所程度までです。ステージⅢ以上の褥瘡を複数個保有されている方などは、高機能エアマットの適用をお願いいたします。

体重が100kgを越える方

十分な体圧分散効果が得られないことがあります。

治療上、高角度の背上げを長時間取られる方

クッションなど補助用具の併用をお願いいたします。

やさしさのこ・だ・わり

マットレスのカバーにもこだわっています。



防水カバーについて PRO仕様マットレスカバー「GALAX® MC」



ケアマットレスのために開発したGalax® MCは、高伸縮ポリエステルニット生地に、高強度特殊ウレタンフィルムをラミネート。ベース生地とウレタンフィルムそれぞれに、特定用途抗菌加工と難燃加工を施しました。抗菌剤を練り込んだウレタン防水膜を表面に配した膜面抗菌で、安定した抗菌効果を発揮。もちろん安全性は、公的な規格で厳密に保証されています。

欧米をはじめとした先進国では、不特定の人が使用するメディカルマットレスには、汚染物質を中に入れない防水カバーの使用がスタンダードとなっています。Galax® MCを使用したPRO仕様のマットレスは、その最先端を行くものです。日常の保清管理も薬液による清拭のみで済み、大幅な省力化と経費の節減がはかれます。

※薬液清拭の頻度他、お使用の状況により、6~8年経過後より防水膜が傷んでくる場合があります。
マットレスカバーの表面に「割れ」が発生した場合、直ちにカバーを交換してください。

■Galaxは小松精練株式会社の登録商標です。