



自在に変形して、体にやさしくなじみます。

ハーフプリコンクッション

プリコンクッションの特徴はそのままに、使いやすいサイズの姉妹品です。



小柄な方や屈曲の強い方の
下肢挙上に便利です。



特殊な中材が、自在に動いて形状を保持。
全く新しい使い心地です。

プリコンクッションで培われた、「お使いになる人に合わせた形を作り出す」特性。
それを半分のサイズでご用意しました。

プリコンクッションをお使いのナースの方々からいただいた意見を集約。

● 小柄な人に使いやすいプリコンクッションが欲しい！

● 下肢牽引の足台でも使えるプリコンが欲しい！

自在な使い勝手はそのままに、様々な場面で便利にお使いいただける、
多用途なクッションに仕上げました。

本体価格 **14,500円** (税込価格 15,950円)

品番	CPC-4101	J A N	4580573240028
重量	(約) 0.8 kg	サイズ (約)	幅 40 × 奥行 80 × 厚さ 16 cm
材質	中 材：ウレタンフォーム、発泡ポリプロピレンビーズ 外カバー：ポリエステル100%、特定用途抗菌・吸水・速乾・帯電防止加工 内カバー：ポリエステル100% ※中材も、内カバーごと丸洗いができます。		

ベッド上のみならず、
様々な場面で便利

- ・下肢や上肢の保持はもちろん、側臥位補助などのポジショニングにも便利。従来からある三角形のポジショニングクッションに比べて、身体の凹凸にやさしくなじんで支えます。
- ・下肢術後の挙上安静にはもちろん、スピードトラック牽引での足台、点滴時の安静保持用、リハビリテーションの補助用具としてなど、様々な場面で便利にお使いいただけます。

使用例



使いやすい 下肢牽引の足台にもどうぞ

既製の足台は形が決まっているので、思わぬ「あたり」によるスキントラブルを招くことも。

ハーフプリコンクッションなら、その人の
足に合わせてなじむので、より安全に、
安楽が保てます。



やさしい
構造

身体に沿って優しくなじみ、
トータルコンタクトで
姿勢を保持

中材には、カットしたウレタンフォームと特殊な発泡ビーズを混合。ウレタンフォームの間にビーズが「潤滑油」のように働き、クッションを自在に変形します。クッションに荷重をかけると、ウレタン同士が接触して形を保持。ビーズは次第にウレタンの間から抜けて、しっかりとした「その人に合わせた形のクッション」になります。

洗濯時のために合わせてどうぞ！

交換用専用外カバー

本体価格 **2,900円** (税込価格 3,190円)

品番	PCC-4101
J A N	4580573240042

やさしい
構造

感染対策も万全 **滅菌洗濯及び乾燥機での乾燥が可能**

特殊発泡ビーズを採用することで「80℃熱水での滅菌洗濯」と「乾燥機による機械乾燥」が可能。衛生的にお使いいただけます。

※高温環境下では、ウレタンやビーズ等の高分子素材の劣化は促進されます。衛生管理上必要なとき以外は、常温洗濯及び低温乾燥をお勧めします。

開発・発売元

Care Products ケアプロダクツ

HOME PAGE www.care-products.jp

〒254-0813 神奈川県平塚市袖ヶ浜17-40-307

【TEL】0463-26-6201 【FAX】0463-26-6202

【E-Mail】info@care-products.jp

●製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。 ●製品写真は印刷の関係上、実際の色とは異なることがあります。 ●価格はメーカー希望小売価格で参考価格です。 ●製品の価格以外に、別途、梱包送料が必要となる場合があります。 ●製品、サービスに関するお問い合わせは、お求めの販売店か、弊社までご連絡ください。



MADE IN JAPAN