




ストレッチャー上で効果的に体圧を分散。そのままX線・CTなどの検査へ

トランスポートマットレス

災害などの非常時には、避難用具としてもお使いいただけます。

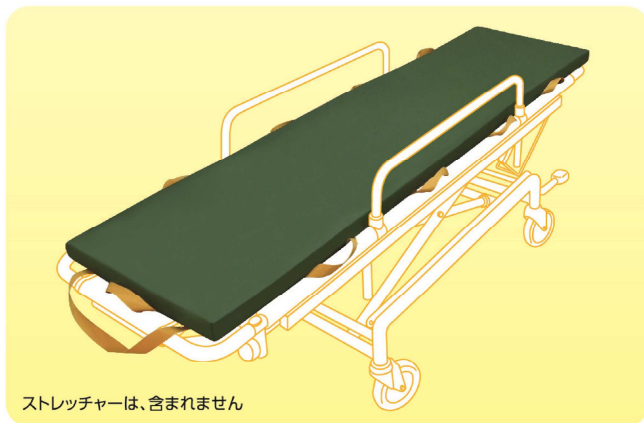

ストレッチャーは、含まれません

- ストレッチャー上で、患者さんの体圧を効果的に分散。身体をやさしく支えます。
- 持ち手を使って、そのままトランスファー。検査台等へ移動する際に、患者さんを持ち上げたりスライドさせたりしないので、身体への負担を減らせます。
- 透過性の良い部材を使用し、金属部品は一切使用していません。X線やCT、MRI(※1)検査も、そのまま行えます。
- 10ヶ所の持ち手を配しました。災害時など、患者さんの搬送にお使いいただけます。担架の転回が困難な階段の踊り場も、通過が可能です。
- 裏面には、高強度生地を採用。非常時には、患者さんを載せて、床面を引きずって移動することもできます。(※2)

本体価格	59,000円 (税込価格64,900円)	中 材	低反発ウレタンフォーム + ポリエチレンフォーム
品 番	CTM-0501	カ バ	【底面以外】ポリエステル、ウレタンラミネートによる防水・特定用途制菌・難燃加工(Galax®MC) 【底 面】ナイロン 【持ち手】ポリプロピレン
JANコード	4580573240141	カ ラ	ダークグリーン、底面のみブラウン
サ イ ズ	(約) 長さ 190 × 幅 50 × 厚さ 4 cm		
重 量	(約) 3 kg		

やさしい構造

薄くてもしっかり体圧分散。腰の強さも兼ね備えました。

上面は、腰のある低反発ウレタンフォーム。薄くても身体になじみ、やさしく体圧を分散します。

下面には、軽量で衝撃吸収性にも優れたポリエチレンフォームを配することで、底付きを防ぎ、しっかりとした腰の強さを実現。患者さんを搬送する際にも、抜群の安定感を作り出します。

また、ストレッチャーでの背上げにも対応できます。

やさしい構造

ストレッチャーから各種検査台へ。移乗無しで移動。

移乗動作は、移乗する側・させる側ともに、身体に大きな負担となります。ロールマットなど各種用具もありますが、最も良いのは「移乗しないで済むこと」。

トランスポートマットレスなら、マットレスごと移乗し、そのまま検査。金属部品を一切使用していないので、X線撮影やCT、MRI(※1)にも対応可能。身体にやさしい運用ができます。

使用例



やさしい構造

非常時には、患者移送に使用できます。

災害時、復旧の遅れるもののひとつが「エレベーター」。患者さんの縦移動が問題となります。

トランスポートマットレスなら、患者さんを載せ、5、6人で前後左右を持つことで、安定した移動が可能。階段では「椅子状」に曲げることで、狭い踊り場を転回しながら移動することができます。

さらに水平面なら、女性一人でも患者を載せて「引きずる」移動もできますので、水平移動は少ない人数で対応し、縦移動に重点的に人員配置することもできます。(※2) 日常使いもできるマットレスなので、ストレッチャー上に配備しておけば、非常時にも探し回る手間無しで、すぐに使用が可能です。

※1 静磁場強度により使用できない場合もありますので、事前試験をお勧めいたします。

※2 落下物等で荒れた床面や、繰り返しの引きずり動作では、マットレスは破損します。あくまで非常時のみにお使いください。

開発・発売元

Care Products ケアプロダクツ

HOME PAGE www.care-products.jp

〒254-0813 神奈川県平塚市袖ヶ浜17-40-307

【TEL】0463-26-6201 【FAX】0463-26-6202

【E-Mail】info@care-products.jp

●製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。 ●製品写真は印刷の関係上、実際の色とは異なることがあります。 ●価格はメーカー希望小売価格で参考価格です。 ●製品の価格以外に、別途、梱包送料が必要となる場合があります。 ●製品、サービスに関するお問い合わせは、お求めの販売店か、弊社までご連絡ください。

MADE IN JAPAN

